

## 사용설명서 (Instruction for use)

### [제조업자 상호 및 주소]

부산광역시 사상구 학감대로 221번길 48  
(주)코웰메디  
Tel. (051)314-2028, Fax. (051)314-2026  
홈페이지 <https://www.cowellmedi.com>

### [품목 신고번호]

제신 17-27 호

### [사용목적]

치과 진료 등에 사용하는 수동식 의료용 큐렛으로서 재사용이 가능하다. 손가락, 고리 형태 등을 포함한다.

### [사용방법]

1. 사용전 준비사항
  - 1) 시술기구에 이물질이나 불순물, 오염 여부와 포장의 손상되었는지 확인한다.
  - 2) 사용 전 수술기구는 멸균한다. 멸균방법은 121°C에서 20분 또는 131°C에서 15분 동안 고압증기멸균기(Autoclave)로 멸균한다.
2. 사용방법
  - 1) 오염이나 기구의 파손 여부를 확인한다.
  - 2) 치료에 적절한 기구를 사용한다.
  - 3) 손잡이 부분을 잡고 팁부분으로 구강내에 우식된 상아질 및 잇몸의 침전물을 긁어낸다.

### [사용시 주의사항]

1. 본래의 목적 이외의 용도로 사용하지 않는다.
2. 무리하게 힘을 주어 사용하지 않는다.
3. 시술 도중에 시술자의 실수에 의해 오염된 시술기구는 사용하지 않는다

### [사용 후 보관 및 관리방법]

사용 후 깨끗이 세척 및 소독하여 직사광선을 피하고 습기가 없는 서늘한 곳에서 보관한다.

### [부작용 보고 관련 문의처]

한국의료기기안전정보원, 080-080-4183

## [라벨 심볼]

1		LOT 번호
2		제품 유효기간
3		제조년월일

"본 제품은 의료기기 임"